



PeriAcryl® 90-HV Alta Viscosidad

El mejor adhesivo intraoral

¿Dónde puedo usar PeriAcryl?

- Tras **colocación** de un **implante dental**
- En una zona **donante de encía**
- En una zona **receptora de injerto** de encía
- En el **margen periodontal** tras una limpieza
- Sobre el **alveolo post-extracción**, cubriendo el colágeno y la sutura
- Tras un **injerto óseo**

¿Qué me aporta PeriAcryl?

- Minimizar riesgos de infección tras una cirugía
- Mayor estabilidad de los tejidos, mejor y más rápida cicatrización
- Mayor satisfacción y comodidad de los pacientes
- Mejores resultados y mayor tranquilidad

Precio

Cada kit contiene 5 ml de adhesivo, bandeja dispensadora y 50 pipetas desechables para 50 usos al precio de 200€ (más IVA 10%)
(Menos de 4€ por uso)

PeriAcryl® 90-HV está diseñado y fabricado en Canadá—www.glustitch.com/periacryl



¿Cómo debo usar PeriAcryl®90-HV?

Después de cargar PeriAcryl®90-HV de la botella con una de las pipetas suministradas, aplicar una cantidad conservadora sobre la zona a cubrir y tocarlo brevemente con una gasa de algodón humedecida. En segundos, se formará una cubierta protectora fuerte.

Ejemplos de tratamiento con PeriAcryl®90-HV

PeriAcryl en un procedimiento de injerto gingival libre



Protegiendo el sitio donante



Removiendo el apósito del sitio receptor



Removiendo el apósito del sitio receptor



Removiendo el apósito del sitio receptor



Removiendo el apósito del sitio receptor



Imagen del sitio donante tras la retirada de PeriAcryl

PeriAcryl protege las membranas, forma una barrera y crea una zona de inhibición para la preservación de alveolos



Para más información y pedidos, contacte con Esp. Médicas Tonal S.L.

Email: info@tonal.es—Teléfono: +34 93 780 47 99